

RECARO Monza Nova 2 Reha

CE


Thomashilfen



1



2



3



4



5




6



7



8

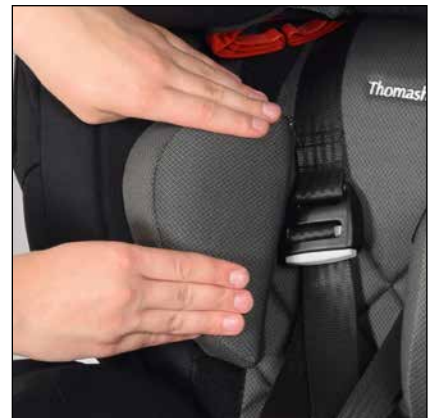

9



10



11



12



13



14



15




16



17



18

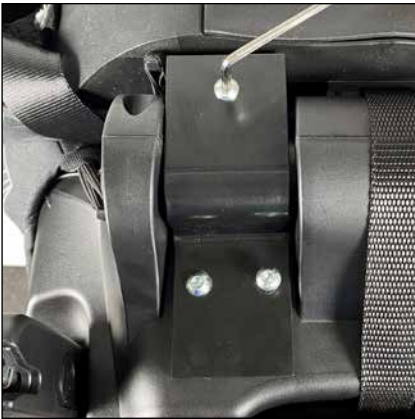

19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44

Уважаемый клиент,

Благодарим вас за выбор нашего продукта и за оказанное нам доверие. Чтобы вы и пользователь могли безопасно, удобно и комфортно пользоваться вашим новым продуктом, мы убедительно просим вас прочитать Инструкцию по использованию. Это также поможет избежать повреждений, травм и неправильной эксплуатации и обращения с изделием. Убедитесь, что копия инструкции по эксплуатации осталась с продуктом, чтобы каждый пользователь имел к ней доступ.

Настоящая инструкция по эксплуатации является дополнением к оригинальной инструкции по эксплуатации RECARO. В результате модификации автокресла для реабилитации обращение с автокреслом несколько изменилось. Модификации описаны в этих дополнительных инструкциях по эксплуатации.



Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с вашим авторизованным дистрибьютором или напрямую с нами.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения. Это может привести к различиям между вашим продуктом и тем, как он представлен в брошюрах и других средствах массовой информации.

Содержание

Иллюстрации	2
Предисловие / Производитель	6
Этикетки / Идентификация модели	7
Общие примечания / техника безопасности	7
Целевое назначение	8
– Область применения	8
– Целевая группа пользователей	8
– Риски и противопоказания	9
– Описание товара	9
– Объем поставки / Базовая комплектация	9
– Ввод в эксплуатацию	9
– Обучение пользователя	9
Параметры / функции	9
– Аксессуары	11
– Технические характеристики	13
– Материалы	13
– Очистка, техническое обслуживание и ремонт	14
– Ежедневная очистка, инструкции по уходу и дезинфекция	14
– Техническое обслуживание / График технического обслуживания	14
– Запчасти	15
– Хранение / утилизация	15
Декларация соответствия ЕС	15
Гарантия	15
Срок использования / Срок службы	16
Повторное использование	16

Этикетки / Идентификация модели

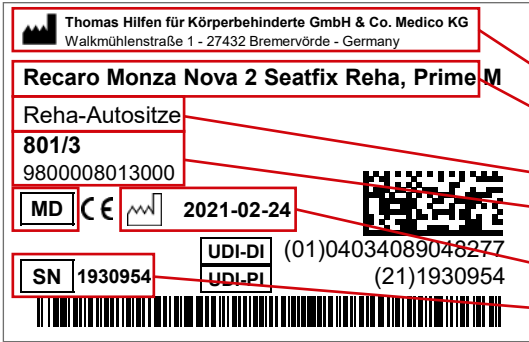Этикетки	Значение
	<p>Этикетка со штрих-кодом</p> <p>Расположение на изделии (рис. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производитель - Наименование товара - Группа товаров - Номер позиции короткий / длинный - MD = Медицинское устройство - Дата производства - Серийный номер
	<p>Заводская табличка</p> <p>Расположение на изделии (рис. 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производитель - Наименование товара - Максимум. вес пользователя / макс. грузоподъемность - Маркировка CE - Следуйте инструкциям по эксплуатации

Общие примечания

- Перед первым использованием внимательно прочтите инструкцию по применению. Если вы испытываете трудности с чтением, попросите прочитать вам. Если копия инструкции по эксплуатации отсутствует, вы можете загрузить ее с сайта www.thomashilfen.de. Содержание цифровой инструкции по эксплуатации может быть увеличено.
- Проверьте упаковку на предмет повреждений при транспортировке и убедитесь, что продукт находится в безупречном состоянии.
- Изменения продукта разрешены только в рамках предполагаемых возможностей настройки.
- Родственники и опекуны могут обеспечить ежедневный уход за изделием. Дистрибьютор выполняет техническое обслуживание и осмотр.
- В некоторых странах необходимо иметь при себе медицинскую справку.
- Автокресло для реабилитации можно использовать как на задних сиденьях, так и на сиденьях переднего пассажира. Выбранное автокресло ДОЛЖНО быть направлено вперед.
- Все этикетки должны оставаться на продукте, и их нельзя подделывать.

Техника безопасности

- Не реже одного раза в 3 месяца проверяйте, работают ли настройки продукта в соответствии с текущими размерами пользователя. При необходимости попросите дистрибьютора / техника-ортопеда отрегулировать настройки.
- Выполняйте регулярные (еженедельные) проверки, чтобы убедиться, что параметры настройки продукта работают.
- Не перегружайте изделие и обратите внимание на максимальный вес пользователя и максимальную грузоподъемность (см. Технические данные).
- Никогда не оставляйте пользователя с изделием без присмотра.
- Продукт должен использоваться только одним пользователем одновременно.
- Все пользователи должны знать, как работает продукт. Таким образом, в экстренной ситуации пользователя можно быстро высадить из продукта.
- Не оставляйте пользователя без присмотра, когда он входит в продукт или выходит из него. Если на подножку будет оказано слишком большое давление, существует опасность поскользнуться или опрокинуться.
- Пользователь всегда должен находиться с ремнем для пятиточечного позиционирования (стандартное оборудование). Сиденье и пользователь всегда должны быть пристегнуты собственным трехточечным ремнем безопасности автомобиля.
- Интенсивный солнечный свет и тепло могут привести к высокой температуре поверхности продукта. В результате существует риск травмы при прикосновении к изделию. Используйте продукт только после того, как он достаточно остынет. В общем, старайтесь защищать изделие от попадания прямых солнечных лучей.
- Обратите внимание на стандарты безопасности, которые применяются к вашему автомобилю и изложены в инструкции по эксплуатации автомобиля, чтобы обеспечить безопасность пользователя.
- Инструкция по эксплуатации должна оставаться вместе с продуктом.
- Если произойдет серьезная и неожиданная авария с изделием, немедленно сообщите об этом нашей компании и ответственным органам.

Подходит для веса тела до 50 кг:

RECARO Monza Nova 2 Reha успешно прошел испытание на перегрузку в Dekra (Клеттвиц) в соответствии с требованиями ECE R 44/04. Таким образом, RECARO Monza Nova 2 Reha одобрен для использования в качестве «удерживающей системы для особых нужд («S»)».

Целевое назначение

Область применения

Автокресло RECARO Monza Nova 2 Reha предназначено для безопасной перевозки людей и людей с ограниченными физическими возможностями и обеспечения безопасного сидения детей в транспортных средствах. Сиденье всегда пристегивается с помощью собственного трехточечного ремня безопасности автомобиля. Ремень для позиционирования с пятиточечной системой в автокресле помогает установить и поддерживать ребенка в вертикальном сидячем положении. Автокресло для реабилитации обеспечивает дополнительную поддержку, чтобы помочь пассажиру надежно сидеть, стабилизирует управление головой, обеспечивает безопасную посадку в области бедер и подставку для ног. Кроме того, продукт имеет широкий выбор аксессуаров для индивидуальной настройки.

Любое использование, выходящее за рамки этого, не соответствует предполагаемому использованию.

Целевая группа пользователей

Автокресло для реабилитации предназначено для детей и детей со структурными и / или функциональными ограничениями или с плохой осанкой головы и туловища. Оно обеспечивает устойчивое физиологическое положение, если стандартное детское автокресло не поддерживает надежно сидящего в автомобиле ребенка.

Риски и противопоказания

При правильном использовании риски могут быть устранены во время использования. Противопоказаний нет.

Описание товара

Объем поставки

Ваш продукт поставляется со стандартным оборудованием и в собранном виде. Все аксессуары, заказанные вместе с продуктом, включены в комплект и должны быть впоследствии собраны. Копия инструкции по эксплуатации прилагается к продукту.

Базовая комплектация

Сиденье и спинка со встроенным подголовником с 11-кратной регулировкой по высоте; встроенные фиксаторы Seatfix, которые можно закрепить в точках автомобилей, оборудованных Isofix; бесступенчатый подголовник для шеи за счет встроенной воздушной подушки; защита от бокового удара; боковые опоры; фиксированные подлокотники; 5-точечный позиционный ремень; паховая накладка; съемный абдукционный блок; встроенные динамики в подголовник для использования трз-плеера, встроенный карман для трз-плеера; система циркуляции воздуха RECARO; съемные крышки.

Ввод в эксплуатацию

- Осторожно снимите транспортировочную защиту и упаковку.
- Храните упаковочный материал и мелкие детали в недоступном для детей месте во избежание проглатывания или удушья.

Обучение пользователя

Пользователя обучает использованию этого устройства персонал, который будет ссылаться на эти инструкции по эксплуатации.

Обученный персонал должен установить сиденье в транспортном средстве вместе с пользователем и отрегулировать сиденье в соответствии с размерами реального пользователя.

Пользователю должны быть показаны все функции продукта, а также способы его установки и снятия с автомобиля.

Параметры / функции

5-точечный ремень

Пожалуйста, обратите внимание:

Ремень с 5 точками позиционирования помогает расположить ребенка в автокресле и не защищает ребенка в случае аварии. В автомобиле необходимо всегда использовать трехточечный ремень для фиксации ребенка в сиденье. Не протягивайте 5-точечный ремень через красные направляющие для ремня на подголовнике. Они предназначены только для 3-точечного ремня.

Регулировка длины ремня:

Потяните за ослабленные полоски ремней, чтобы укоротить и затянуть их. Чтобы удлинить ремни, нажмите спусковой механизм на регулировочной пряжке и затем вытяните ремни на нужную длину.

При необходимости длину ремня можно также отрегулировать с помощью двух ремней (закрепленных болтами) на спинке сиденья (см. рис. 3 "Регулировка длины ремня").

Пряжка ремня:

Чтобы открыть пряжку, нажмите на красную кнопку на ней. Разъедините две верхние застёжки ремня. Чтобы застегнуть ремень, вставьте застёжки ремня в пряжку и сдвиньте их, пока они не встанут на место с слышимым «щелчком» (см. рис. 4 "Открытие и закрытие пряжки ремня («Щелчок»)").

Подголовник

Отрегулируйте подголовник сиденья в самое высокое положение, чтобы облегчить его установку.

Обтяните крышки опор на боковые части подголовника и закрепите их вверху кнопкой. Накладки крепятся к нижней части подголовника с помощью эластичной резинки (см. рис.5 "Крепление подголовника"/ рис.6 "Крепление снизу" и рис.7 "Крепление сверху").

Боковые поддержки спинки

Боковые поддержки могут быть закреплены на 3 разных высотах слева и справа в области спины с помощью кнопок, крючка и петли. Начните с нажатия кнопок.

Опоры можно закрепить более надежно, нажав на флисовые полосы на спинке сиденья.

Боковые поддержки сиденья

Установите спинку в горизонтальное положение для облегчения крепления боковых поддержек. Натяните чехлы боковых поддержек на боковые части поверхности сиденья и с помощью кнопки прикрепите их к задней части поверхности сиденья (см. рис.10 "Крепление опоры" / рис.11 "Нажать кнопку сзади").

Абдуктор

Абдуктор можно регулировать по глубине. Для этого его сначала нужно освободить от пахового ремня. Снимите часть ремня с конца пахового ремня и вытащите ремень из скользящей пряжки и пряжки ремня. Потяните абдуктор вверх и снимите с пахового пояса.

Проденьте паховый ремень обратно через скользящую пряжку и пряжку ремня и закрепите свободный конец ремня с помощью наконечника ремня. Поместите абдуктор, если необходимо, на застёжку-липучку на дне сиденья.

Чтобы снять крышку, сначала нужно освободить отводящий блок из пахового ремня, как описано выше (см. рис.12 "Наконечник ремня"/ Рис.13 "Снятие наконечника ремня", рис.14 "Отстегивание скользящей пряжки и пряжки ремня / рис.15 "Удаление абдуктора").

Isofix (рис. 16)

Isofix (LATCH) - это международно стандартизированная система крепления детских автокресел. Соответствующие точки крепления Isofix надежно прикреплены к автомобилю. Детские автокресла Isofix можно быстро и легко закрепить в стандартизированных точках крепления автомобиля. Таким образом, сиденье надежно закрепляется в автомобиле даже без ребенка и его не нужно закреплять с помощью трехточечного ремня безопасности.

Пожалуйста, заранее проверьте, есть ли в вашем автомобиле точка крепления Isofix.

Аксессуары

Примечания: информацию по установке можно найти в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к аксессуару. Если копия инструкции по эксплуатации отсутствует, вы можете загрузить ее с сайта www.thomashilfen.de. Сборка / разборка аксессуаров производится стандартными инструментами.

Основание (рис. 17)

Основание необходимо для использования другого аксессуара. Оно прикреплено спереди к поверхности сиденья реабилитационного автокресла.

Поворотная пластина с адаптером для подножки (рис. 18)

Благодаря функции поворота автокресло можно повернуть к двери автомобиля. Для лиц, осуществляющих уход, упрощается доступ к 5-точечной системе ремней автокресла. Пользователю легче входить и выходить независимо. Одновременно к адаптеру в передней части кресла можно прикрепить другие аксессуары.

Задние стабилизаторы (рис. 19)

Стабилизаторы удерживают подвижную спинку автокресла. При использовании функции поворота они предотвращают случайное откидывание спинки автокресла.

ISOFIX (рис. 20)

ISOFIX можно использовать в автомобиле с адаптером Seatfix для повышения устойчивости автокресла. Дополнительная устойчивость особенно необходима, если также используется функция поворота (и / или функция наклона). Адаптер Seatfix также фиксирует автокресло в автомобиле, когда оно не используется.

Стабилизирующая дуга (рис. 21)

Стабилизирующая дуга прикрепляется к спинке автокресла и вставляется в зазор между поверхностью сиденья и спинкой автомобильного сиденья. Подходит, если нельзя использовать ISOFIX. Дополнительная устойчивость особенно необходима, если также используется функция поворота (и / или функция наклона).

Подножка, передняя (рис. 22)

Подножка помогает стабилизировать автокресло. Дополнительная устойчивость особенно необходима, если также используется функция поворота (и / или функция наклона).

Клин сиденья снаружи (рис. 23)

Клин сиденья (внизу) надевается на сиденье автомобиля, чтобы наклонить автокресло. Наклон спинки удобен для детей с небольшим напряжением тела и / или плохим контролем головы.

Подушка расположена по центру под автокреслом. Высокий край спереди обеспечивает оптимальное положение для отдыха ребенка.

Обратите внимание: функция поворотного основания значительно ухудшается при использовании в сочетании с клином сиденья. Поэтому мы не рекомендуем использовать клин и поворотное основание одновременно (см. рис.24 "Установка сиденья на клин"/ рис.25 "Конечное положение").

Клин сиденья внутри (рис.26)

Клин сиденья внутри надевается на поверхность сиденья или на нижнюю часть спинки автокресла. С его помощью можно быстро и гибко изменить положение, например, на активное или пассивное положение сиденья, уменьшить глубину сиденья или установить более стабильное положение сиденья.

Клин сиденья можно прикрепить к поверхности сиденья в 3 различных положениях:

1. Активная поза достигается размещением клина на сиденье так, чтобы высокая сторона была обращена назад.
2. Закрепите клин на крючке и петле так, чтобы плоская сторона была обращена назад, чтобы обеспечить более пассивную позу / положение покоя.
3. Чтобы уменьшить глубину сиденья, вы также можете закрепить клин сиденья на крючке и петле в вертикальном положении, широкой стороной вниз.

Две боковые накладки для дополнительной защиты крепятся по бокам на крючках и петлях (см. рис.27 "Активная"/ рис.28 "Пассивная"/ рис.29 "Сзади" / рис.30 "С боковыми накладками").

Столик (рис.31)

Столик размещают перед пользователем. Это даёт пользователю стабильность и чувство безопасности. Пользователь может опереться на него и сидеть прямо. Он закрывает вид на пряжку ремня и не дает пользователю расстегнуть ее.

Чтобы закрепить столик к сиденью, сдвиньте его вперед с двух сторон сиденья. Он крепится с двух сторон двумя планками на липучках. Проденьте планки с липучками стола через пластиковые кольца на сиденье / спинки сиденья (тазовый ремень). Смотрите рис.32 "Крепление стола"/ рис.33 "Крепление ремней к сиденью".

Мягкий чехол для ремня безопасности (рис. 34)

Мягкий чехол для ремня безопасности защищает плечи пользователя от болезненного давления и порезов ремнями.

Нагрудный зажим (рис. 35)

Нагрудный зажим соединяет плечевые ремни автокресла (застегивается на пряжку). Он предотвращает скручивание и скольжение ремня.

Подставка для ног (рис. 36)

С подставкой для ног пользователь прочно сидит в автокресле, потому что она поддерживает ноги. Это предотвращает соскальзывание пользователя с сиденья на пол автомобиля. Подставку для ног можно сложить, чтобы было легче садиться и выходить. С подставкой для ног пользователь может самостоятельно попрактиковаться в посадке и выходе из автокресла.

Если используется поворотное основание, подставка для ног прикрепляется к адаптеру подставки для ног, встроенному в поворотное основание. В этом случае обязательно предохраняйте подставку от падения с помощью ручки, прилагаемой к руководству пользователя. Приемник для ручки (металлический блок с резьбой) расположен на левом стержне адаптера подножки.

Чтобы стабилизировать подножку на полу автомобиля, отрегулируйте высоту опорных стержней, ввинчивая или выкручивая их до тех пор, пока они не коснутся автомобиля. Затем заблокируйте опорные стержни ручками, чтобы предотвратить их случайное откручивание. Как можно глубже закрутите ручки вверх и быстро затяните. Длина голени: она регулируется путем изменения высоты подножки. Ослабьте оба внешних винта. Подтягивайте их после каждой регулировки. Угол ступни: ослабьте четыре винта слева и справа на нижней стороне подножки, чтобы отрегулировать желаемый угол ступни с помощью направляющих. Затем снова затяните винты.

Обратите внимание: подставку для ног нельзя использовать вместе с увеличенной глубиной сиденья.

Примечание. Чтобы подставка для ног была надежно прикручена к сиденью, потребуется «адаптер подставки для ног». Смотрите рис.37 "Вставить подставку для ног"/ рис.38 "Закрепить"/ рис.39 "Отрегулируйте высоту в соответствии с автомобилем".

Подушка для увеличения глубины сиденья (рис. 40)

С увеличением глубины сиденья поверхность сиденья реабилитационного автокресла увеличивается.

Если используется поворотное основание, увеличение глубины сиденья прикрепляется к адаптеру подставки для ног, встроенному в поворотное основание. В этом случае обязательно предохраняйте удлинитель сиденья от падения с помощью ручки, прилагаемой к руководству пользователя. Приемник ручки (металлический блок с резьбой) находится на левом стержне адаптера подножки.

Обратите внимание: удлинитель сиденья нельзя использовать в сочетании с подставкой для ног. Смотрите рис.41 "Вставьте" / рис.42 "Закрепите".

Жилет от выскальзывания (рис. 43)

Жилет, предотвращающий выскальзывание, не дает ребенку "выскочить" из автокресла.

Защитная подкладка на сиденье (рис.44)

Защитная подкладка находится под детским автокреслом на сиденье автомобиля и на спинке сиденья. Она защищает поверхность сиденья и спинку сиденья автомобиля от повреждений. Мелкие вещи можно хранить в передних карманах.

Технические характеристики**RECARO Monza Nova 2 Reha**

RECARO MONZA NOVA 2 REHA	
Глубина сиденья	30 см (с увеличенной глубиной) 43 см
Ширина сиденья	(перед) 27 см (зад) 24 см
Высота спинки (сиденье)	60-77 см
Высота плеч (ребенок)	33-48 см
Длина голени (подставка для ног уст-на на поворотной пластине)	23 - 42 см
Длина голени (подставка для ног уст-на на сиденье)	18.5-37.5 см
Габариты (Ш x В x Г)	54 x 66 x 42 см
Вес сиденья	7 кг
Вместимость	15 - 50 кг
Рост ребенка	94 - 150 см

Материалы

Обивка: 100% полиэстер - RECARO Prime

Материал, используемый для набивки, является «огнестойким» и был протестирован в соответствии с DIN EN 1021-1 и DIN EN 1021-2.

Материал и компоненты прошли стандартные испытания для определения степени их устойчивости к воспламенению и были оценены как маловероятные возгорания.

Очистка, техническое обслуживание и ремонт

Ежедневная чистка, инструкции по уходу и дезинфекция

Обивка

Обивку можно легко снять и постирать отдельно. Она состоит из тканевого чехла и иногда наполнителей из поролона. Проверьте, есть ли у набивки застежка-молния или застежка-крючок. Если это так, откройте обивку и удалите поролоновый наполнитель перед стиркой чехла. Также обратите внимание на следующие инструкции по уходу:



Обращаем ваше внимание на то, что даже качественные материалы могут выцветать в результате длительного и интенсивного воздействия солнечных лучей или частой стирки.

Застежки-липучки

Чтобы застежки-липучки работали хорошо, время от времени чистите их щеткой. Перед стиркой всегда закрывайте или закрывайте застежки-липучки.

Пластиковые детали

Пластиковые детали изделия можно чистить и дезинфицировать обычным мылом (нейтральным мылом).

Металлические части

Металлические детали изделия можно чистить и дезинфицировать обычным мылом (нейтральным мылом).

Дезинфекция

Перед дезинфекцией очистите обивку, пластиковые и металлические детали.

Смочите дезинфицирующим средством все пластиковые и металлические детали. Следует использовать только продукты на водной основе. При дезинфекции соблюдайте указания производителя.

Техническое обслуживание и осмотр дистрибьютором

Подготовка

Копия инструкции по эксплуатации должна быть приложена к продукту. Если такой нет, запросите копию у дистрибьютора. Ознакомьтесь с принципами работы продукта. Если вы не знакомы с продуктом, прочтите Инструкцию по эксплуатации. Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с сотрудником, с которым вы имели дело, или напрямую с Thomashilfen.

Обслуживание и ремонт продукта должны выполняться только квалифицированным персоналом. Пользователь несет ответственность за то, чтобы предписанные проверки / техническое обслуживание выполнялись регулярно и своевременно. Если повреждение очевидно, пользователь должен активно проинформировать об этом, и квалифицированный персонал должен немедленно устранить повреждение.

График технического обслуживания - Ежегодный осмотр

	Основное	Функциональность		Повреждения		Замена	
1	Пластиковый корпус	☉		☉			
2	Возможные регулировки	☉		☉			
3	Обивка			☉			
4	Ремни	☉		☉			
5	Пластиковые детали	☉		☉			
6	Винты и гайки	☉		☉			
7	Этикетки			☉			
Аксессуары							
8	Обивка			☉			
9	Ремни	☉		☉			
10	Возможные регулировки	☉		☉			
11	Пластиковые детали	☉		☉			
12	Металлические части	☉		☉			
13	Винты и гайки	☉		☉			
Примечания:							
☉= Осмотрено ☹= Повт. исп. ✓= Тест пройден							

Запчасти

Для ремонта следует использовать только оригинальные запчасти. Список запасных частей доступен на сайте www.thomashilfen.de. Для получения нужных запасных частей или для возможных отзывов по техническим причинам нам обычно требуется серийный номер / UDI-PI и точный UDI-DI.

Снятие / установка запасных частей должна производиться только квалифицированным персоналом! В случае возврата убедитесь, что продукт надежно упакован для транспортировки.

Хранение

Храните продукт в безопасном месте, когда он не используется. Не кладите на изделие тяжелые предметы во время его хранения. Защищайте изделие от непогоды, например от дождя, сильного солнечного света и мороза. Если продукт влажный, вытрите насухо металлические и пластиковые части и дайте набивке высохнуть, прежде чем хранить продукт.

Утилизация

Если продукт больше не может использоваться из-за его состояния или срок службы подошел к концу, его можно утилизировать в местной компании по утилизации отходов.

Декларация соответствия ЕС

Настоящим мы заявляем, что этот продукт, а также любые его версии и аксессуары соответствуют основным нормам. Действующую Декларацию соответствия ЕС можно посмотреть на сайте www.thomashilfen.de или запросить непосредственно у нас.

Гарантия

Thomashilfen предлагает вам гарантию на 1 год на этот продукт. Гарантийный срок начинается с момента передачи товара. Гарантия распространяется на все претензии, связанные с функцией автокресла. Не учитываются повреждения, возникшие в результате неправильного использования (например, перегрузки) и естественного износа.

Срок использования

Срок использования продукта до 6 лет при правильном использовании и регулярном обслуживании профессионалом. Изделие можно использовать и после этого, если оно находится в безопасном и технически исправном состоянии.

Теоретический срок использования не означает гарантированный срок службы. Это зависит от интенсивности использования и всегда проходит индивидуальную оценку дистрибьютора.

Период использования заканчивается раньше указанного срока, если пользователь достиг максимальной массы тела или максимального роста для безопасного использования продукта.

Срок использования не распространяется на изнашиваемые детали, такие как накладки, чехлы и т. д.

Срок службы

Срок службы изделия составляет 8 лет при соблюдении требований, предъявляемых к сроку использования. Срок службы складывается из срока использования и хранения.

Повторное использование

Товар не подходит для повторного использования. Функциональность детских автокресел не может быть определена с учетом теоретической смены пользователей. Это может привести к незаметному повреждению продукта, что исключает дальнейшее безопасное использование. Поэтому продажа и покупка бывших в употреблении детских автокресел запрещены производителем.