

EASyS Advantage

Инструкция по эксплуатации
Кресло Thomashilfen EASyS Advantage на
комнатной раме Q



CE

Thomashilfen

Содержание

Сиденье EASyS Advantage (без рамы)	3
Иллюстрации	4
Предисловие / Производитель	9
Маркировка / идентификация модели	9
Правила техники безопасности	10
Целевое назначение	10
– Предполагаемое использование / области применения	10
– Целевая группа пользователей	11
– Риски, связанные с использованием, и противопоказания	11
Описание товара	11
– Объем поставки / базовое оборудование	11
– Опции	11
– Ввод в эксплуатацию	11
– Обучение пользованию	12
Варианты регулировки/функции	12
– Аксессуары	14
– Технические характеристики	16
– Материалы	17
Чистка, техническое обслуживание и ремонт	17
– Ежедневная очистка, инструкции по уходу и дезинфекция	17
– Техническое обслуживание и осмотр дистрибьютором	17
– Запчасти	18
– Хранение/Утилизация	18
Декларация соответствия ЕС	18
Гарантия	18
Период использования / срок службы	18
Повторное использование	18
Q-Рама	19
Иллюстрации	20
Маркировка / идентификация модели	22
Использование по назначению	23
– Назначение / области применения	23
Установка товара	23
Настройка параметров / функций	24
– Аксессуары	25
– Технические характеристики	25
– Материалы	25

Сиденье EASyS Advantage (без рамы)






1



2




3

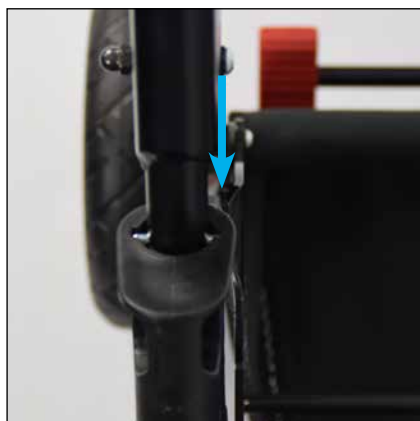

4



5

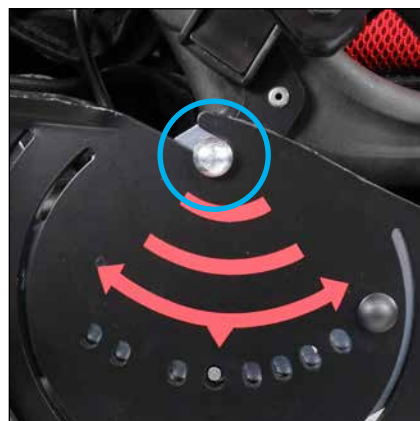

6




7




8




9

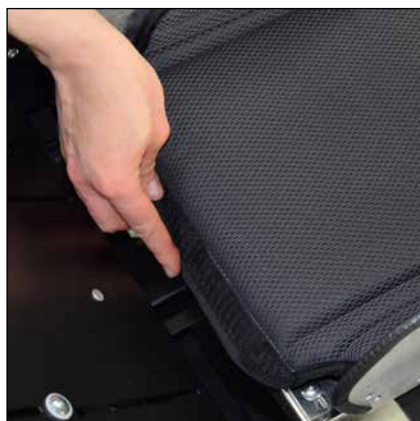

10

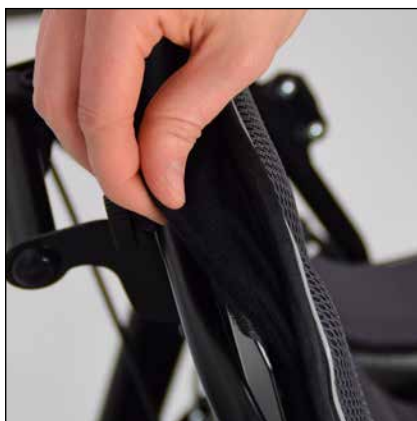

11

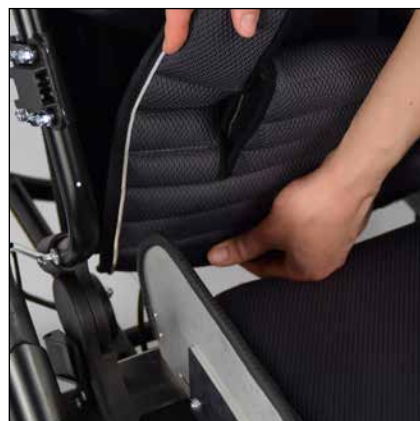

12



13



14



15



16



17



18



19




20



21



22

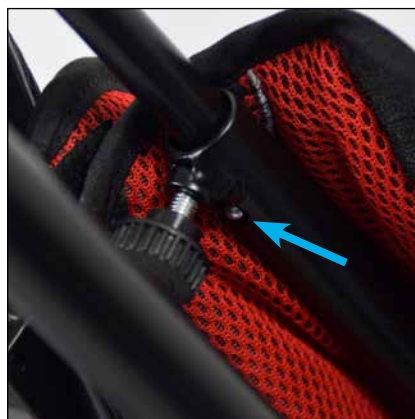

23



24



25



26



27



28



29



30




31




32



33

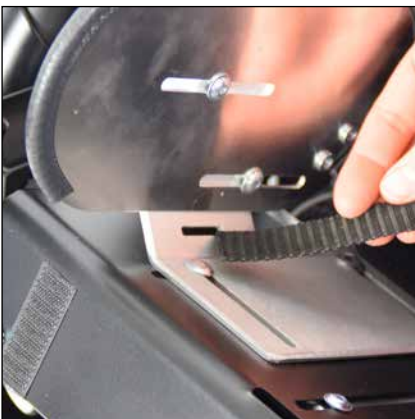

34

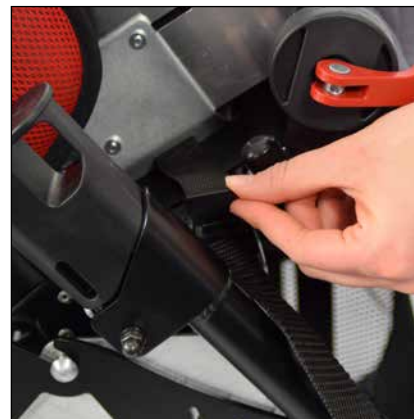

35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за выбор нашего продукта и за оказанное нам доверие. Для того, чтобы вам и пользователю было безопасно, удобно и комфортно пользоваться новым продуктом, убедительно просим вас ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации. Это также поможет избежать повреждений, травм и неправильной эксплуатации и обращения с изделием. Пожалуйста, убедитесь, что копия Инструкции по использованию остается с продуктом, чтобы каждый пользователь имел к ней доступ.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим авторизованным дистрибьютором или напрямую с нами.

Мы оставляем за собой право вносить технические изменения. Это может привести к различиям между вашим продуктом и тем, как он представлен в брошюрах и других средствах массовой информации.

Маркировка / идентификация модели

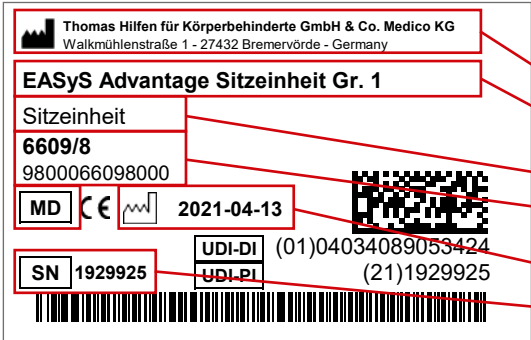Этикетка	Значение
	Этикетка со штрих-кодом Расположение на товаре (рис. 1 + 2) <ul style="list-style-type: none">- Производитель- Наименование товара- Группа товаров- Номер товара короткий / длинный- MD = Медицинское устройство- Дата производства- Серийный номер
	Заводская табличка Расположение на товаре (рис. 1 + 2) <ul style="list-style-type: none">- Производитель- Наименование товара- Максимум. вес пользователя / макс. грузоподъемность- Маркировка CE- Следуйте инструкциям по использованию

Общая информация

- Внимательно прочтите Инструкцию по применению перед первым использованием. Если у вас есть трудности с чтением, пожалуйста, попросите кого-нибудь прочитать вам. Если копия Инструкции по применению отсутствует, ее можно загрузить с сайта www.thomashilfen.com. Содержание цифровой Инструкции по применению может быть увеличено.
- Проверьте упаковку на наличие повреждений при транспортировке и убедитесь, что изделие находится в безупречном состоянии.
- Внесение изменений в продукт разрешено только в рамках предусмотренных вариантов настройки.
- Уборку и ежедневный уход могут обеспечить родственники и опекуны. Техническое обслуживание и проверка осуществляются дистрибьютором.
- Очищайте раму изделия по мере необходимости.
- Всегда вытирайте изделие насухо, если оно намокло. Никогда не протирайте влажной тканью после использования.
- Все винты на изделии необходимо нагреть перед снятием, так как они крепятся с помощью фиксатора резьбы. Если изделие необходимо снова собрать, все винты необходимо зафиксировать с помощью фиксатора резьбы.
- Все этикетки должны оставаться на изделии, и их нельзя подделывать.

Правила техники безопасности

- Не реже одного раза в 3 месяца проверяйте, работают ли настройки продукта для текущих размеров тела пользователя. При необходимости попросите дистрибьютора/техника-ортопеда изменить настройки.
- Выполняйте регулярные (еженедельные) проверки, чтобы убедиться, что параметры настройки продукта работают.
- Будьте осторожны с движущимися частями при регулировке или складывании изделия.
- Поднимать изделие можно только за прочно приваренные или свинченные части.
- Перед каждым использованием проверяйте затяжку всех гаек, болтов и винтов.
- Убедитесь, что оба винта с внутренним шестигранником находятся на подставке для ног.
- Пожалуйста, не перегружайте изделие и учитывайте максимальный вес пользователя и максимальную грузоподъемность (см. технические данные).
- Никогда не оставляйте пользователя с изделием без присмотра.
- Продукт должен использоваться одновременно только одним пользователем.
- Все пользователи должны быть знакомы с тем, как работает продукт. Таким образом, в экстренной ситуации пользователь может быть быстро высажен из кресла.
- Не оставляйте пользователя без присмотра, пока он садится или высаживается из кресла. Если слишком сильно давить на подставку для ног, есть риск поскользнуться или опрокинуться.
- Всегда закрепляйте пользователя в изделии с помощью удерживающего ремня (стандартное оборудование или аксессуар).
- Не вешайте на изделие тяжелые сумки или другие предметы, так как это увеличивает риск опрокидывания. Используйте корзину под сиденьем.
- Всегда проверяйте, работает ли тормоз перед использованием изделия. Если тормоз не работает должным образом, продукт не следует использовать.
- Стояночный тормоз всегда должен быть включен, когда пользователь садится в кресло или высаживается из него.
- При кратковременной или длительной остановке используйте тормоз, чтобы изделие случайно не откатилось.
- Мокрые шины могут отрицательно сказаться на торможении.
- Если вы не используете изделие, не оставляйте тормоз включенным. Постоянно включенный стояночный тормоз может повредить шины.
- Интенсивный солнечный свет и высокая температура могут привести к высокой температуре поверхности продукта. В результате существует риск получения травмы при прикосновении к изделию. Используйте продукт только после того, как он достаточно остынет. В общем, старайтесь беречь изделие от прямых солнечных лучей.
- Ношение светоотражающей одежды, особенно в темное время суток, делает вас и вашего ребенка более заметными для других автомобилистов – используйте это преимущество.
- В случае серьезной и неожиданной аварии с изделием немедленно сообщите об этом нашей компании и ответственным органам.
- Не подвергайте пружины чрезмерному давлению или высоким температурам.
- Если, вопреки ожиданиям, с изделием произойдет серьезный инцидент, немедленно сообщите об этом нашей компании и ответственным органам.

Целевое назначение

Предполагаемое использование / области применения

Кресло на комнатной раме состоит из сиденья EASyS Advantage в сочетании с Q-Рамой. Реабилитационное кресло гарантирует постоянную мобильность. Сиденье в сочетании с рамой Q подходит только для использования в помещении.

Кресло имеет варианты регулировки, которые делают транспортировку безопасной и стабильной в течение длительного периода времени. Кроме того, продукт имеет наклонное положение на 180°, а угол сиденья можно быстро отрегулировать одной рукой. Встроенная система безопасности балансировки (СББ) предотвращает опрокидывание. Также продукт имеет широкий спектр аксессуаров для индивидуальной настройки. Любое использование, выходящее за рамки инструкции, не соответствует предполагаемому использованию.

Целевая группа пользователей

Изделие подходит для перевозки детей и детей со значительными и тотальными нарушениями подвижности и функциональными повреждениями нижних конечностей. Кроме того, реабилитационное кресло предназначено для детей со структурными и/или функциональными ограничениями, затрагивающими голову и туловище. Оно особенно подходит для детей, которых необходимо перевозить лежа и которые чувствительны к сотрясениям.

Риски, связанные с использованием, и противопоказания

При правильном использовании риски могут быть устранены во время использования. Известных противопоказаний нет.

Описание товара

Объем поставки

Ваш продукт поставляется со стандартным оборудованием и в предварительно собранном виде. Если сиденье было заказано вместе с рамой Q, оно уже установлено на раме при доставке. Все аксессуары, заказанные вместе с изделием, входят в комплект поставки и должны быть собраны впоследствии. Копия Инструкции по применению прилагается к изделию. Шестигранный ключ, входящий в комплект поставки изделия, необходим для регулировки и затяжки подставки для ног.

Базовое оборудование

СББ (система безопасности балансировки) – сиденье безопасности; шарниры для тазобедренного и коленного суставов; дышащая обивка сиденья и спинки, а также боковая обивка; дополнительная обивка для большего комфорта сидения; огнестойкие ткани; боковые направляющие сиденья; наклоняемая подставка для ног, регулируемая по высоте и углу наклона; кронштейны для защиты от солнца и дождя; плавно регулируемые высота спинки, угол наклона бедер, глубина и ширина сиденья; ремень для голени.

Опции

Размеры

Сиденье EASyS Advantage размер 1

Сиденье EASyS Advantage размер 2

Цвета

красный / серый; синий / серый; зеленый / серый; розовый / серый; серый / серый.

Ввод в эксплуатацию

- Осторожно снимите транспортную защиту и упаковку.
- Храните упаковочный материал и мелкие детали в недоступном для детей месте во избежание проглатывания или удушья.
- Товар поставляется в сложенном виде. Обратите внимание на примечания по складыванию в разделе, посвященном параметрам регулировки.

С помощью рычага фиксатора сиденье можно снять с Q-Рамы без инструментов. Важно, чтобы рычаг фиксатора оставался нажатым при установке и снятии сиденья. При первом использовании сиденья и рамы не требуются никакие инструменты, за исключением шестигранного ключа, входящего в комплект поставки.

Обучение пользованию

Пользователь обучается, как использовать это устройство, при помощи персонала, который будет ссылаться на настоящую Инструкцию по использованию.

Варианты регулировки/функции

Сиденье

Установка сиденья

Активируйте рычаг фиксатора на спинке и вставьте сиденье в раму сверху (рис. 3). Убедитесь, что кнопки по бокам сиденья между складывающимся шарниром и соединительной планкой задней рамы и скользящей опоры правильно продеты (рис. 4). Теперь вставьте кнопки по бокам сиденья в приемные пазы (рис. 5) и дайте сиденью встать на место (рис. 6).

Внимание: Всегда следите за тем, чтобы стопорные штифты с обеих сторон сиденья прочно вошли в отверстие.

Снятие сиденья

Чтобы снять сиденье, нажмите на рычаг фиксатора и потяните сиденье вверх из рамы (рис. 3). Убедитесь, что кнопки по бокам сиденья между складывающимся шарниром и соединительной планкой задней рамы и скользящей опоры правильно продеты (рис. 4).

Установка подставки для ног

Подставка для ног должна быть закреплена в коленных суставах. Для этого совместите шарнирные соединения и закрепите их на винтах (изнутри), сиденье (снаружи) и эксцентриковых рычагах (снаружи; рис. 7).

Обивка

Подушки сиденья

Подушка сиденья состоит из двух элементов: основной серой подушки и дополнительной черной подушки для большего комфорта. Дополнительная подушка крепится с помощью крючка и петли к нижней стороне основной подушки (рис. 8). При этом обратите внимание, чтобы выемка на дополнительной накладке была обращена вперед (рис. 9). Закрепите чехол сиденья, надежно прикрепив его к заднему концу пластины сиденья с помощью клапана с липучкой (рис. 10). Два нижних ремня с крючками и петлями оборачиваются вокруг стержней подставки для ног. При необходимости дополнительную накладку можно снять.

Обивка спинки

Обивка спинки крепится к верхней части спинки, как и планка с крючками и петлями на спинке (рис. 11). Нижняя часть обивки спинки вставляется сзади между сиденьем и спинкой (рис. 12). Нижний конец снабжен крючком и петлей и прикреплен к заднему концу пластины сиденья, чтобы закрыть зазор между сиденьем и спинкой (рис. 13).

Боковая подушка

Поместите каждую из более коротких боковых подушек на боковые трубки так, чтобы крючок и петля были обращены внутрь (рис. 14). Застежка-липучка расположена на внешней стороне изгиба спинки. Прикрепите подушку таким образом, чтобы верхний край подушки сзади заканчивался чуть ниже винта с накатанной головкой (рис. 15). Затем прикрепите заднюю часть подушки с помощью крючка и петли (рис. 16). Молнии короткой боковой подушки при необходимости можно сдвинуть внутрь.

Прикрепите каждую из более длинных подушек к внутренней стороне изгиба спинки. Более длинные подушки крепятся на высоту, чтобы они находились на одном уровне с верхним краем внешних боковых подушек (рис. 17).

Боковая обивка сидений

Боковую обивку сиденья можно открыть с помощью молнии. Она натягивается на боковые направляющие сиденья таким образом, чтобы полоса снаружи проходила сзади/сверху вперед/снизу (рис. 18).

Держатель для навеса

EASyS Advantage стандартно поставляется с держателями для навеса (без накидки для ног) (рис. 19). Их высоту можно регулировать по мере необходимости. Для этого ослабьте винты держателей навеса и переместите их на трубах в нужное положение. Затем снова плотно затяните винты.

Держатель голени

Ремешок для голени крепится между двумя боковыми стойками подставки для ног и поддерживает голени пользователя (рис. 47).

Ширина сиденья

Чтобы отрегулировать ширину сиденья, ослабьте четыре гайки под сиденьем EASyS Advantage и соответствующим образом переместите боковые элементы (рис. 20). Затем снова затяните гайки. Если глубина сиденья установлена на минимальную глубину, максимальная регулируемая ширина сиденья зависит от зазора перед боковой обивкой спинки сиденья.

Глубина сиденья

Ослабьте две передние гайки под сиденьем EASyS Advantage и потяните пластину сиденья вперед (рис. 20). Затем снова затяните гайки.

Совет: Чтобы легко отрегулировать глубину сиденья, возьмитесь одной рукой за передний край сиденья, а другой рукой крепко держите нижний конец спинки (в центре). Глубина боковой направляющей сиденья также может регулироваться. Для этого расстегните подушки боковых направляющих сидений с молниями и снимите их. Ослабьте два винта, установите нужную глубину и снова затяните винты (рис. 21).

Высота спинки

Ослабьте два винта с накатанной головкой на боковых трубах (рис. 22). Теперь высоту спинки можно плавно регулировать вплоть до точки зацепления (пружинные штифты входят в зацепление со щелчком). Чтобы уменьшить высоту спинки, нажмите на пружинные штифты под винтами с накатанной головкой и сдвиньте заднюю пластину вниз на нужную высоту (рис. 23).

Для достижения максимальной высоты спинки также ослабьте оба винта с накатанной головкой на верхней перекладине и потяните заднюю пластину вверх (рис. 24). Затем снова затяните все винты с накатанной головкой.

Совет: удлиненная трубчатая дуга обеспечивает дополнительную безопасность для детей, которые преимущественно перевозятся в горизонтальном положении.

Угол наклона спинки

Ослабьте зажимной рычаг на спинке (рис. 25) и снимите предохранительный штифт под рычагом (рис. 26). Теперь спинку можно привести в нужное положение. Сиденье автоматически скользит вперед по направляющим, перемещая центр тяжести (рис. 27). Необходимо убедиться, что штифт со щелчком встал на место. Наконец, снова затяните зажимной рычаг после установки положения.

Примечание. Сиденья имеют разное количество отверстий для предохранительного штифта на спинке. (EASyS Advantage размер 1: 2 отверстия; EASyS Advantage размер 2: 4 отверстия).

При транспортировке детского кресла в автомобиле предохранительный штифт всегда должен входить в самое нижнее отверстие (угол сиденья 90°). Другие отверстия можно использовать для установки других часто используемых углов сиденья.

Длина голени

Установочные винты сбоку подставки для ног можно ослабить с помощью шестигранного ключа (размер 3; рис. 28). Теперь подставку для ног можно регулировать бесконечно. Затем необходимо снова затянуть установочные винты.

Угол наклона подставки для ног

Ослабьте четыре винта справа и слева на нижней стороне подставки для ног, отрегулируйте желаемый угол наклона стопы, а затем снова затяните винты. Вам понадобится накидной или комбинированный ключ на 10 мм (рис. 29). Установите угол наклона коленей, ослабив красный эксцентриковый рычаг на обоих коленных суставах (рис. 7). Совет: подставку для ног можно сложить, чтобы упростить посадку и высадку из кресла.

Транспортировочное крепление

Сиденье EASyS Advantage вместе с Q-Рамой можно сложить для перевозки в багажнике автомобиля. Соблюдайте инструкции по складыванию кресла и используйте замок для складывания, чтобы избежать непреднамеренного раскладывания.

Сиденье и раму можно разделить, чтобы их можно было поднимать по отдельности. В связи с этим, пожалуйста, обратитесь к инструкции по снятию сиденья.

Чтобы обеспечить максимально простое обращение, возьмитесь одной рукой за блок сиденья за ручку на спинке, к которой также прикреплен рычаг расцепления для наклона сиденья (рис. 3). Другой рукой возьмитесь за передний край сиденья.

Аксессуары

Примечания: Информация по установке содержится в инструкции по эксплуатации, которая прилагается к аксессуару. Если копия Инструкции по применению отсутствует, ее можно загрузить с сайта www.thomashilfen.com. Сборка/разборка аксессуаров производится стандартными инструментами.

Прикрепление ремней

В зависимости от размера ребенка протяните два верхних ремня через отверстия в амортизирующей подкладке и вставьте их в прорези в задней пластине (рис. 30). Затем вставьте ремни в пряжки и отрегулируйте нужную длину (рис. 31). Два нижних конца ремней можно прикрепить пряжками к задней части спинки или к пластиковому элементу сбоку (рис. 32-33). Проведите ремни слева и справа от обивки спинки и продолжайте до соответствующей пряжки, а затем застегните их.

Передние ремни 4-точечного поясного ремня также крепятся к пластиковому элементу с правой и левой стороны с помощью пряжки. Протяните ремень через прорезь в боковой направляющей сиденья, вставьте его в пряжку и застегните (Рис. 34-35).

Совет: Кроме того, длину ремня можно регулировать спереди; для этого потяните за D-образное кольцо, чтобы укоротить ремень.

Абдуктор (Рис. 36)

Абдуктор помогает развести ноги в тазобедренном суставе и расположить бедра. Он идет на коленях и предотвращает скрещивание ног.

Поручень (Рис. 37)

Поручень обеспечивает дополнительную устойчивость при сидении. Модель поручня с «острым углом» можно регулировать и использовать еще ближе или дальше от пользователя.

Столик (Рис. 38)

Столик состоит из прочного корпуса, который крепится перед пользователем. На столике можно проводить различные лечебные мероприятия.

Боковые поддержки (Рис. 39)

Боковые опоры закреплены в нужном положении на лицевой стороне спинки и поддерживают туловище пользователя с левой и правой сторон. В результате улучшено и поддерживается управление туловищем. Пользователь по-прежнему может двигать руками.

Боковые поддержки с ремнем (Рис. 40)

Боковые опоры закреплены в нужном положении на лицевой стороне спинки и поддерживают туловище пользователя слева и справа. В результате улучшено и поддерживается управление туловищем. Пользователь по-прежнему может двигать руками. Обе опоры могут быть немного наклонены вперед и связаны ремнем. Таким образом, пользователь получает дополнительную поддержку спереди.

Накладка на раму (Рис. 41)

Накладка рамы расположена вдоль боковых стоек толкателя. Она имеет большое значение для защиты беспокойных пользователей от травм.

Сумка для принадлежностей (Рис. 42)

Сумка для принадлежностей кладется за спинку сиденья. Сумка используется для перевозки важных вещей, необходимых в дороге.

Н-образный ремень (Рис. 43)

Н-образный ремень — это простое вспомогательное средство для позиционирования верхней части тела, особенно плеч и таза.

2-точечный ремень (Рис. 44)

Двухточечный тазовый ремень — это простое средство для стабилизации тазовой области пользователя. Он проходит горизонтально через пах пользователя.

4-точечный ремень (Рис. 45)

Тазовый ремень с 4 точками — это простое средство для стабилизации тазовой области пользователя. Он проходит горизонтально через пах пользователя, а также крепится с каждой стороны под сиденьем.

Ремешок для промежности (Рис. 46)

Промежностный ремень можно использовать только в сочетании с Н-образным ремнем или тазовым ремнем. Это дает пользователю дополнительную устойчивость в области таза и предотвращает выскальзывание пользователя из ремней.

Ремни для разведения ног (Рис. 47)

Ремни представляет собой вспомогательное средство для позиционирования тазовой области. Они также поддерживают положение бедер и предотвращают скрещивание ног.

Нагрудный ремень-бабочка (Рис. 48)

Нагрудная обвязка «бабочка» — это мягкое вспомогательное средство для позиционирования верхней части тела, особенно плеч и таза. «Гибкая» модель сделана из очень мягкого материала, чтобы не было следов от давления.

Нагрудный жилет (Рис. 49)

Жилет для сидения представляет собой мягкое вспомогательное средство для позиционирования верхней части тела, обеспечивающее дополнительную поддержку пользователя благодаря своей большой поверхности. Его можно легко открыть спереди.

Подголовник (Рис. 50)

Подголовник обеспечивает надежную боковую поддержку головы пользователя. Он прикреплен к верхней части спинки сиденья и наклонен вперед под углом 90°.

Подголовник, гибкий 45° (Рис. 51)

Подголовник (45°) обеспечивает надежную боковую поддержку головы пользователя. Он прикреплен к верхней части спинки сиденья и наклонен вперед под углом 45°. Пользователь имеет больше свободы движений и лучший боковой обзор, чем со стандартной моделью подголовника.

Держатели стоп (Рис. 52)

Оба ремешка закрепляют ноги пользователя непосредственно на подставке для ног. Ноги больше не могут скользить.

Ремешок для голени (рис. 53)

Ремешок для голени крепится между двумя боковыми стойками подставки для ног и поддерживает голени пользователя.

Подкладка для подставки для ног (Рис. 54)

Подкладка для подставки для ног защищает голень пользователя.

Технические характеристики

EASYS ADVANTAGE	размер 1	размер 2
Глубина сиденья	19 - 30 см	27 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 31 см	25 - 37 см
Высота спинки	41.5 - 68 см	55 - 74 см
Длина голени	17.5 - 29 см	21 - 37 см
Угол бедра	90° - 180°	90° - 180°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол стопы	78° - 100°	78° - 100°
Диапазон поворота сиденья	180°	180°
Наклон сиденья (по напр-ю движ-я)	-10° - 35°	-10° - 35°
Наклон сиденья (лицом к лицу)	0° - 35°	0° - 35°
Направляющая бедер (Ш x В)	23 x 12 см	30 x 15 см
Подножка (Ш x Г)	28 x 18 см	32 x 21 см
Вес сиденья	9 кг	10.4 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг

Материалы

Подкладка: полиэстер – Trevira CS

Материал, используемый для подкладки, является «огнестойким» и протестирован в соответствии с DIN EN 1021-1 и DIN EN 1021-2. Материал и компоненты прошли стандартные испытания для определения степени их устойчивости к воспламенению и были оценены как маловероятные для воспламенения.


Материал Trevira CS — это высококачественный воздухопроницаемый материал, который прошел положительный тест на биосовместимость. (DIN EN ISO 10993-5 и 10993-10 Trevira CS, черный)

Чистка, техническое обслуживание и ремонт

Ежедневная очистка, инструкции по уходу и дезинфекция

Обивка

Подкладку можно легко снять за несколько простых шагов и постирать отдельно. Она состоит из тканевого покрытия и иногда наполнителей из пены. Проверьте, есть ли на обивке молния или застежка на крючок и защелку. Если это так, откройте обивку и удалите поролоновый наполнитель перед стиркой чехла. Также обратите внимание на следующие инструкции по уходу:

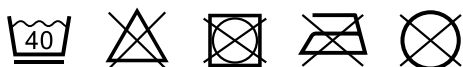

Отметим, что даже качественные материалы могут выгореть в результате длительного и интенсивного воздействия солнечных лучей или частой стирки.

При смене пользователей производителем предлагается «комплект обивки для повторного использования».

Застежки-липучки

Чтобы застежки-липучки работали хорошо, время от времени чистите их щеткой. Всегда закрывайте застежки-липучки перед стиркой.

Пластиковые части

Пластиковые детали изделия можно очищать и дезинфицировать обычным мылом (нейтральным мылом).

Металлические части

Металлические части изделия можно очищать и дезинфицировать обычным мылом (нейтральным мылом).

Дезинфекция

Перед дезинфекцией очистите обивку, пластиковые и металлические детали.

Протрите влажной тканью все пластиковые и металлические части изделия дезинфицирующим средством. Следует использовать только продукты на водной основе. При дезинфекции обратите внимание на указания соответствующего производителя.

Обивка и чехлы должны быть продезинфицированы перед повторным использованием. Для этого используйте правильное моющее средство в соответствии с рекомендациями Ассоциации прикладной гигиены VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) или используйте «комплект обивки для повторного использования», предлагаемый производителем.

Техническое обслуживание и осмотр дистрибьютором

Подготовка

Копия Инструкции по применению должна быть приложена к изделию. Если такой нет, запросите копию у дистрибьютора. Ознакомьтесь с тем, как работает продукт. Если вы не знакомы с продуктом, прочтите Инструкцию по применению перед его использованием. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с сотрудником, с которым вы общались, или непосредственно с компанией Thomashilfen.

Обслуживание и ремонт изделия должен выполнять только квалифицированный персонал. Пользователь несет ответственность за регулярное и своевременное выполнение предписанных проверок/обслуживания. Если повреждение очевидно, пользователь должен сообщить об этом, квалифицированный персонал немедленно устранит повреждение.

Запчасти

Для ремонта следует использовать только оригинальные запасные части. Список запасных частей доступен на сайте www.thomashilfen.com. Для получения нужных запасных частей или возможного технического отзыва нам обычно требуется серийный номер / UDI-PI и точный UDI-DI.

Снятие/установку запасных частей должен производить только квалифицированный персонал! В случае возврата, пожалуйста, убедитесь, что товар надежно упакован для транспортировки.

Хранение

Храните изделие в безопасном месте, когда оно не используется. Не кладите тяжелые предметы на изделие во время его хранения. Защищайте изделие от таких погодных условий, как дождь, сильный солнечный свет и мороз. Если изделие намокло, вытрите насухо металлические и пластмассовые детали и дайте высохнуть набивке, прежде чем убрать изделие на хранение.

Утилизация

Если изделие больше нельзя использовать из-за его состояния или срок его службы подошел к концу, его можно переработать в местной компании по утилизации отходов. Пожалуйста, ознакомьтесь с местными инструкциями по переработке и утилизации.

Декларация соответствия ЕС

Настоящим мы заявляем, что этот продукт, его версии и аксессуары соответствуют основным положениям. Текущую Декларацию соответствия ЕС можно загрузить с сайта www.thomashilfen.de или запросить у нас напрямую.

Гарантия

Thomashilfen предлагает вам гарантию на один год. Гарантийный срок начинается с момента передачи товара. Гарантия распространяется на все претензии, влияющие на функционирование. Не учитываются повреждения, возникшие в результате неправильного использования (например, перегрузки) и естественного износа.

Период использования

Продукт имеет срок службы до 6 лет при правильном использовании и регулярном обслуживании профессионалом в соответствии с информацией от производителя. Изделие можно использовать после этого срока, если оно находится в безопасном и технически исправном состоянии. Время нахождения на складе у дистрибьютора не засчитывается в срок использования.

Теоретический срок использования не соответствует гарантированному сроку службы. Это зависит от интенсивности использования и всегда оценивается дистрибьютором в индивидуальном порядке.

Период использования не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, такие как подкладки, чехлы и т. д.

Срок службы

Продукт имеет срок службы 8 лет или 2 раза может использоваться для повторного использования (3 пользователя) при соблюдении требований, предусмотренных сроком использования. Срок службы состоит из периода использования и времени хранения между повторными использованиями.

Повторное использование

Продукт подходит для повторного использования. Перед передачей следующему пользователю изделие всегда должно быть тщательно очищено и продезинфицировано. Состояние должно проверяться обученным персоналом на предмет износа и повреждений. Любые проблемы должны быть устранены, чтобы обеспечить дальнейшее безопасное использование продукта. Копия Инструкции по применению является составной частью продукта и должна быть передана новому пользователю.

Q-Pama





1



2



3




4



5



6

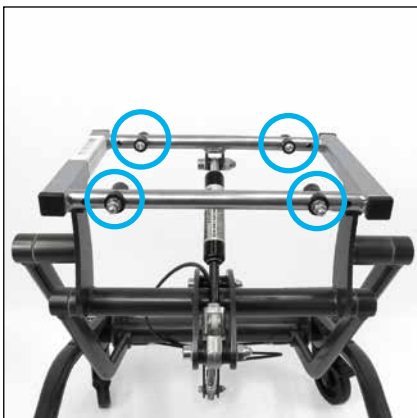

7



8




9



10



11

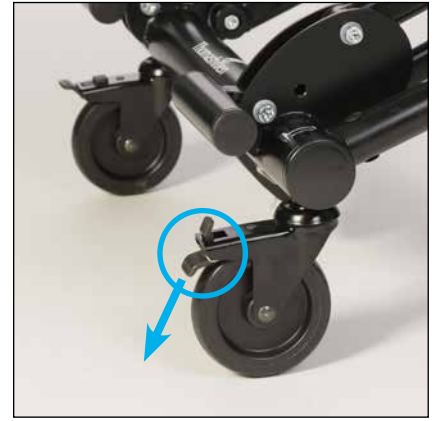

12



13



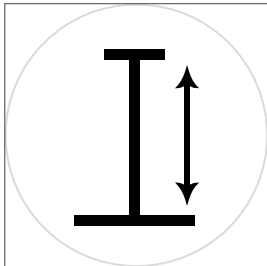



14



15

Маркировка / идентификация модели

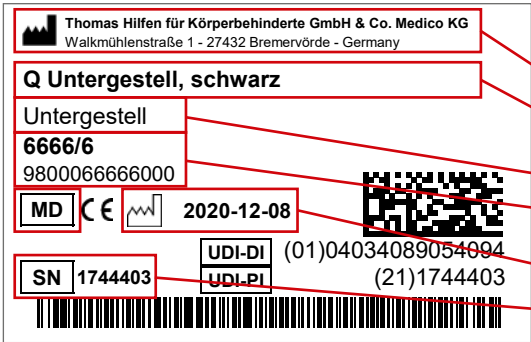Маркировка	Значение
 <p> Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG Walkmühlenstraße 1 - 27432 Bremervörde - Germany Q Untergestell, schwarz Untergestell 6666/6 9800066666000 MD CE 2020-12-08 SN 1744403 UDI-DI (01)04034089054094 UDI-PI (21)1744403 </p>	<p>Этикетка со штрих-кодом</p> <p>Положение на изделии (рис. 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производитель - Наименование товара - Группа товаров - Артикул короткий/длинный - MD = медицинское устройство - Дата производства - Серийный номер
 <p> Thomashilfen Walkmühlenstraße 1 27432 Bremervörde Germany Q-Chassis max. Belastbarkeit (inkl. Sitzeinheit) / max. carrying capacity (incl. seat unit): 50 kg / 110.2 lbs CE i </p>	<p>Типовая табличка</p> <p>Положение на изделии (рис. 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Производитель - Наименование товара - Максимальная грузоподъемность - Знак CE - Следуйте инструкциям
	<p>Регулировка высоты сиденья</p> <p>Положение на изделии (рис. 3)</p>
	<p>Регулировка наклона сиденья</p> <p>Положение на изделии (рис. 3)</p>

Использование по назначению

Назначение / области применения

Q-раму можно использовать только в помещении в сочетании с подходящим сиденьем. Рама подходит для использования дома, в детском саду и в школе. Увеличенная посадка и, при необходимости, регулируемая высота сиденья и угол наклона сиденья помогают пользователю быть более активным в повседневной жизни. Регулировку удобно производить с помощью газовых пружин. Нижняя рама в сочетании с подходящим сиденьем не должна отягощаться дополнительными грузами.

Любое другое использование или использование, выходящее за рамки этого, считается ненадлежащим.

Установка товара

- Осторожно снимите транспортировочные фиксаторы и упаковку.
- Храните упаковочный материал и мелкие детали в недоступном для детей месте во избежание риска проглатывания или удушья.
- Товар поставляется в сложенном виде. Обратите внимание на примечания о складывании под параметрами настройки элемента.
- Ослабьте защелки на ножных педалях и зафиксируйте их, повернув на четверть оборота. Затем можно отрегулировать высоту сиденья и, при необходимости, наклон сиденья (рис. 4-6).

Установка сиденья, размер 1

- Сиденье должно располагаться по центру между болтовыми соединениями (рис. 7).

Установка сиденья, размер 2

- Перед тем, как вставить сиденье в Q-раму, 4 соединения на адаптере сиденья должны быть перемещены во внешние отверстия (рис. 8).

Настройка параметров/функций

Складывание

Приведите спинку сиденья в максимальное лежачее положение, ослабьте коленный шарнир и поверните подставку для ног вверх и вниз к сиденью (рис. 9). Переместите наклон сиденья в горизонтальное положение и опустите корпус сиденья на пол.

Внимание: при складывании держите часть рамы одной рукой, чтобы она не опрокинулась, и всегда будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы.

Регулировка высоты сиденья

Сиденье можно опустить на пол (рис. 10).

Для этого нажмите правую ножную педаль на задней части рамы (рис. 4). Теперь опустите сиденье вниз (за спинку, подлокотники или толкатель, если таковой имеется) или потяните его вверх, пока не будет достигнута желаемая высота. Чтобы сохранить высоту, просто уберите ногу с педали. Высоту сиденья также можно регулировать во время использования кресла. Может потребоваться, чтобы два человека подняли сиденье на нужную высоту. В целях безопасности регулировка высоты сиденья может быть заблокирована. Регулировка блокируется, когда стопорный штифт слева от педали находится в зацеплении (рис. 6). Чтобы отпереть, выньте стопорный штифт и прокрутите на четверть оборота.

Важно: Во время использования кресла регулировка высоты сиденья всегда должна быть заблокирована.

Внимание: При регулировке высоты сиденья один человек должен закрепить системы сидения обеими руками, чтобы избежать резких изменений положения ребенка. Мы рекомендуем выполнять эту настройку без ребенка в кресле.

Регулировка наклона сиденья

Для регулировки наклона сиденья в пространстве используйте педаль на левой стороне задней рамы (рис. 5 + 11).

Для начала, включите тормоза (рис. 12). Теперь либо выдвиньте сиденье вперед (за спинку, подлокотники или толкатель, если таковой имеется), либо потяните его назад, пока не будет достигнут желаемый угол наклона. Чтобы сохранить угол наклона, уберите ногу с педали. Наклон сиденья в пространстве также можно регулировать во время использования кресла. Может потребоваться, чтобы два человека отрегулировали желаемый угол наклона сиденья. В целях безопасности регулировка наклона сиденья в пространстве может быть заблокирована. Регулировка блокируется, когда стопорный штифт слева от педали находится в зацеплении (рис. 5). Чтобы отпереть, выньте стопорный штифт и прокрутите на четверть оборота.

Важно: Регулировка наклона сиденья в пространстве всегда должна быть заблокирована во время использования кресла.

Внимание: При регулировке наклона сиденья в пространстве один человек должен закрепить системы сидения обеими руками, чтобы избежать внезапного изменения положения ребенка. Мы рекомендуем выполнять эту настройку без ребенка в кресле.

Функция стояночного тормоза

Блокировка/разблокировка колес

Задние колеса оснащены легкодоступными и простыми в использовании тормозами. Чтобы заблокировать колеса, нажмите на стопорное устройство вниз (рис. 12). Если снова поднять его вверх, колеса снова будут свободно перемещаться (рис. 13). Тормоза блокируют как вращение, так и поворот колес, так что рама надежно тормозится только задними колесами.

Аксессуары

Примечание. Информацию об установке можно найти в соответствующих инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к аксессуару. Если инструкция по применению отсутствует, ее можно загрузить с сайта www.thomashilfen.com. Сборка/разборка аксессуаров осуществляется с помощью имеющихся в продаже инструментов.

Адаптер (рис. 14)

Адаптер позволяет надежно прикрепить соответствующее сиденье к основанию.

Ручка для толкания кресла (рис. 15)

Ручка для толкания облегчает лицам, осуществляющим уход за ребенком, толкание и маневрирование кресла.

Технические характеристики

Q-рама:

Угол наклона сиденья	-7° до +31°
Высота сиденья с обивкой	29 - 69 см
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	73 x 54 x 59
Высота адаптера	21 - 60 см
Размер колес (передние поворотные колеса)	100 мм
Размер колес (задние со стояночным тормозом)	100 мм
Вес (без сиденья)	13,5 кг
Макс. грузоподъемность (включая сиденье)	50 кг

Материалы

Высококачественная труба из стали и алюминия, покрытая прочной порошковой эмалью.