

# Swifty

## Нагрудный ремень-бабочка / нагрудный жилет

Инструкция по сборке - аксессуары




CE

Thomashilfen



1

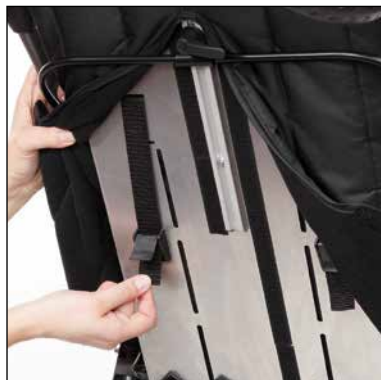

2



3

Отрежьте обивку спинки в стеганом шве в зависимости от желаемой высоты установки.

Проденьте два верхних ремня через отверстия в обивке и вставьте их в заднюю панель (рис. 1).

Расстегните крючок и петлю на обивке спинки. Вставьте ремни в кулачковые пряжки и отрегулируйте желаемую длину ремня (рис. 2).

Два нижних конца ремня можно прикрепить с помощью кулачковых пряжек к задней пластине (рис. 3). Направьте ремни влево и вправо рядом с обивкой спинки к соответствующей кулачковой пряжке и зафиксируйте их. Закройте заднюю обивку.

СОВЕТ: Длину ремня также можно регулировать спереди. Потяните за D-образное кольцо, чтобы укоротить ремень.