

EASy

Корзина для оборудования

Инструкция по сборке - аксессуар





1



2



3



4



5



6

Вставьте корзину для оборудования в корпус прогулочной рамы сзади (см. рис. 1). Зажимы на корзине для оборудования должны защелкиваться на задней оси (см. рис. 2). Наша рекомендация состоит в том, чтобы защелкивать зажимы один за другим. Пожалуйста, имейте в виду, что существует риск попадания пальцев между зажимами и осью. Используйте защелкивающиеся крючки на передней части корзины для оборудования, чтобы прикрепить ее к большим отверстиям на переднем конце боковых частей прогулочной рамы Advantage (см. рис. 3). Для складывания корпуса необходимо снять корзину для оборудования.

При установке корзины для оборудования на шасси Advantage размера 1, пожалуйста, помните о следующих инструкциях: После установки корзины, как описано выше, следует использовать два дополнительных зажима (входят в комплект поставки). Вставьте штифты зажимов в отверстия в задней верхней горизонтальной трубе (см. рис. 4). Зажимы защищают трубку от возможных царапин, вызванных подставкой для ног при использовании положения лицом к лицу.

В корзине для оборудования имеются прорези, которые можно использовать для прикрепления ремней медицинских устройств (см. рис. 5). Ремни не входят в комплект поставки. Пожалуйста, имейте в виду, что максимальная грузоподъемность корзины для оборудования составляет 5 кг.

2 Наш совет: Для облегчения загрузки подставку для ног можно сложить вверх (см. рис. 6).