

tRide


Ремни для разведения ног

Инструкция по сборке – аксессуар




CE

Thomashilfen

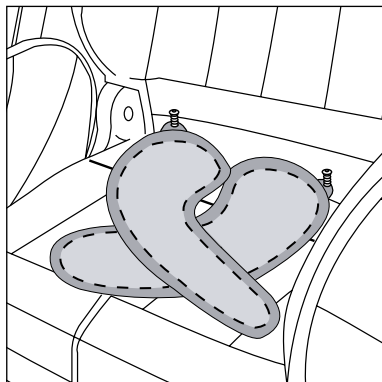

1

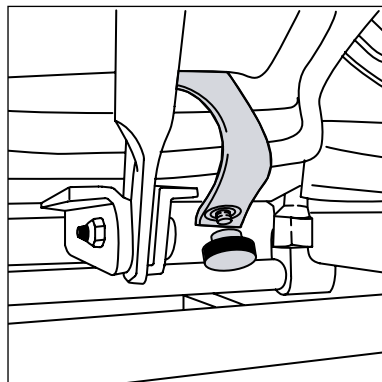

2



3



4

Положите ремень для разведения ног на поверхность сиденья (пряжками вниз) (рис. 1).

Прикрепите два ремня, которые проходят сзади под сиденьем, к задней диагональной трубе (поверните винт с большим пальцем на имеющейся резьбе) (рис. 2).

Два нижних конца ремня могут быть прикреплены с помощью кулачковых пряжек к любой задней пластине (рис. 3) или пластиковый элемент сбоку (рис. 4). Направьте ремни влево и вправо рядом с обивкой спинки к соответствующей кулачковой пряжке и зафиксируйте их.

СОВЕТ: Длину ремня также можно регулировать спереди. Потяните за D-образное кольцо, чтобы укоротить ремень.