

# · Swifty


## 2-точечный и 4-точечный ремни безопасности

Инструкция по сборке – аксессуар





1

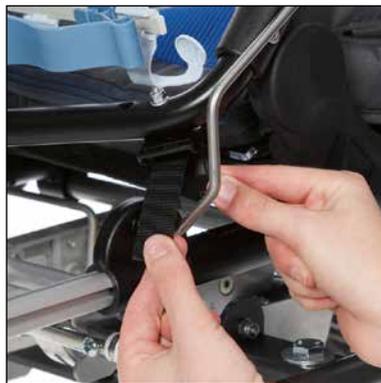

2



3



4



5

Два нижних конца ремня можно прикрепить с помощью кулачковых пряжек либо к задней пластине, либо к пластиковому элементу сбоку (рис. 1-3).

Направьте ремни влево и вправо рядом с обивкой спинки к соответствующей кулачковой пряжке и зафиксируйте их.

Передние ремни 4-точечного тазового ремня также крепятся справа и слева на пластиковом элементе с кулачковой пряжкой. Пропустите ремень через прорезь в ширинной пластине, вставьте его в кулачковую пряжку и зафиксируйте (рис. 4 + 5).

Swiftу (только 2-точечный тазовый пояс)

Два нижних конца ремня можно прикрепить с помощью кулачковых пряжек к задней пластине (рис. 6). Направьте ремни влево и вправо рядом с обивкой спинки к соответствующей кулачковой пряжке и зафиксируйте их.

**СОВЕТ:** Длину ремня также можно регулировать спереди. Потяните за D-образное кольцо, чтобы укоротить ремень.