

· tRide

**2-точечный и 4-точечный ремни безопасности**

Инструкция по сборке – аксессуар




CE

Thomashilfen



1

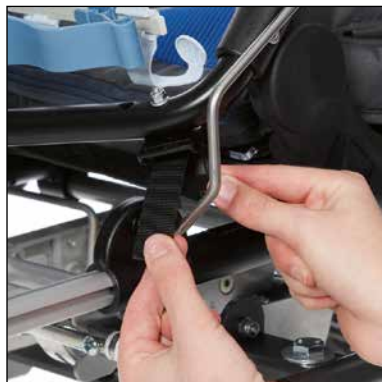

2



3



4



5

tRide

Два нижних конца ремня можно прикрепить с помощью кулачковых пряжек либо к задней пластине/ задней дужке, либо к пластиковому элементу сбоку (рис. 1-3). Направьте ремни влево и вправо рядом с обивкой спинки к соответствующей кулачковой пряжке и зафиксируйте их.

Передние ремни 4-точечного тазового ремня также крепятся справа и слева на пластиковом элементе с кулачковой пряжкой. Пропустите ремень через прорезь в ширинной пластине, вставьте его в кулачковую пряжку и зафиксируйте (рис. 4 + 5).