

EASyS Modular S

Навес; навес прозрачный с мешком для ног; навес с мешком для ног

Инструкция по сборке - аксессуары



CE

Thomashilfen



Расстегните молнии на левой и правой боковой обивке спинки.

Приемники (пластиковые опорные кронштейны) уже установлены слева и справа от рамы.

Теперь вставьте навес в приемник. Застегните молнии как можно дальше.

Чехол для ног можно застегнуть на капюшон, чтобы закрепить его. При необходимости фартук капюшона можно полностью снять с помощью застежки на крючок и петлю (под задней рамой капюшона) .

ВНИМАНИЕ: Реабилитационную коляску нельзя складывать, пока установлен чехол от солнца и дождя.