

Swifty 2


Минимайзер

Инструкция по сборке-аксессуар





1

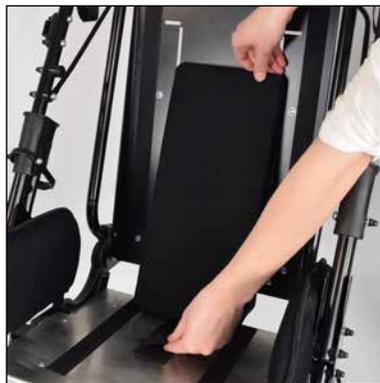


2



3



4

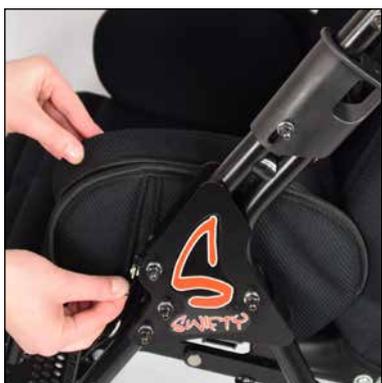

5



6



7



8



9



10



11

Минимайзер сиденья состоит из 4 частей: клина сиденья, подушки для головы и двух боковых направляющих подушек сиденья. Это начинается с фиксации клина сиденья.

Клин сиденья:

Для установки клина сиденья откройте молнию на обивке спинки и снимите обивку со спинки и пластины сиденья. (рис. 1) Установите клин сиденья более широким концом на сиденье так, чтобы он опирался непосредственно на заднюю панель. Теперь приклейте полоску клина сиденья с крючком и петлей к пластине сиденья и закрепите клин сиденья с помощью крючка и петли. (рис. 2) После этого натяните обивку на сиденье и спинку и застегните молнию.

Подушка для головы:

Сначала проденьте плечевые ремни через пряжку подушки для головы снизу и закрепите ремни на задней части спинки. (рис. 3+4) Затем подголовник можно установить по высоте с помощью пряжек.

Боковые направляющие накладки сиденья:

Откройте молнию на боковых направляющих накладках сиденья Swifty 2 и снимите их с боковых пластин. После этого натяните боковые направляющие накладки ремня безопасности на боковые пластины и закройте молнии. Обратите внимание, что толстая обивка указывает на внутреннюю часть коляски. (рис. 5)

ВНИМАНИЕ: При складывании прогулочной коляски Swifty 2 rehab переверните обивку боковых направляющих подушек сиденья вверх, чтобы обивка могла скользить между нажимной ручкой и спинкой. (рис. 6-8)

СОВЕТ: Для лучшего положения ребенка дополнительно можно использовать боковую опору для туловища. Просто прикрепите накладки на заднюю панель и положите на них заднюю обивку. (рис. 9+10) В качестве альтернативы вертикальные прорези в обивке спинки можно разрезать, чтобы через них проходили боковые опоры багажника. (рис. 11)