


# EASyS Advantage

## Адаптер

Инструкция по сборке - аксессуар

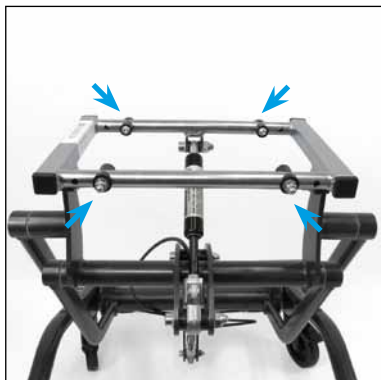



1




2



3



4

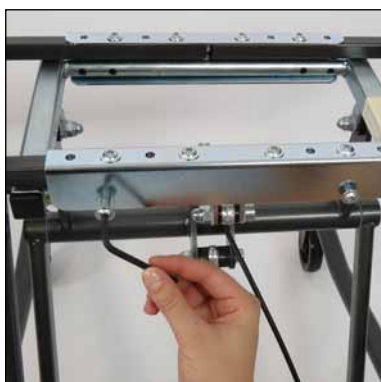

5



6



7



8



9



10



11



12

## **Установка адаптера**

Зафиксируйте задние тормоза шасси Q и выверните винты и распорки на шасси (рис. 1).

Установите адаптер на шасси таким образом, чтобы наклонная пластина была обращена вперед, а прямая пластина с двумя отверстиями - назад (рис. 2+3).

При установке адаптера наденьте наклонную пластину спереди на трубу корпуса и сложите заднюю часть адаптера на заднюю трубу (рис. 4).

Адаптер крепится к корпусу Q сзади с помощью двух винтов (рис. 5).

## **Установка блока сидений EASyS Advantage**

Когда адаптер поставляется, он устанавливается на сиденье размером 1 (рис. 6).

Для установки посадочного места размером 2 необходимо открутить восемь винтов на адаптере. Затем пластины можно вытянуть наружу, и восемь винтов вставляются в четыре наружных отверстия и в четыре отверстия, которые являются третьим отверстием от самого внешнего (рис. 7).

При установке блока сиденья нажмите на спусковой крючок на задней панели блока сиденья. В вертикальном положении вставьте сиденье EASyS Advantage в углубление, предусмотренное в адаптере, с помощью боковых штифтов, пока не услышите отчетливый щелчок штифтов (рис. 8+9).

## **Снятие блока сидений EASyS Advantage**

Нажмите на спусковой крючок на задней панели блока сидений и направьте блок сидений назад/вверх из углубления, предусмотренного в адаптере (рис. 8).

Чтобы разобрать адаптер, выверните два задних винта, приподнимите заднюю часть адаптера и слегка надавите на адаптер из передней трубки корпуса.

## **Примечания, касающиеся безопасности**

- **Внимание:** При установке адаптера и опускании сиденья существует риск защемления пальцев.
- Перед использованием убедитесь, что штифты блока сиденья зафиксированы (рис. 9).
- При установке и снятии адаптера и блока сидений применяйте торможение задних колес шасси Q.
- Прикрепите сиденье к шасси Q только с помощью подставки для ног в направлении длинных труб каркаса (рис. 10).
- Кроме того, соблюдайте указания по технике безопасности и инструкции по эксплуатации, прилагаемые к реабилитационной коляске EASyS Advantage и шасси Q.

## **СОВЕТ:**

Для легкого доступа к передним мягким гайкам блока сиденья поднимите подставку для ног вверх (рис. 11).

Задние гайки также легко доступны (рис. 12).