

· tRide

**H-образный ремень / нагрудный ремень-  
бабочка / нагрудный жилет**

Инструкция по сборке - аксессуары



CE

Thomashilfen



1



2



3

Отрежьте обивку спинки в стеганом шве в зависимости от желаемой высоты установки или откройте клапан обивки спинки. Потяните молнию вниз, чтобы открыть подкладку, расстегните и отпустите застежку на крючок и петлю.

Проденьте два верхних ремня через отверстия в обивке и вставьте их в заднюю панель. Для облегчения монтажа слегка выдвиньте заднюю панель. Для этого ослабьте два винта с накаткой сзади.

Вставьте ремни в кулачковые пряжки и отрегулируйте желаемую длину ремня (рис. 1). Снова закройте клапан обивки спинки с помощью застежки на крючок и петлю. Отрегулируйте желаемую высоту спинки и снова затяните винты.

Два нижних конца ремня можно прикрепить с помощью кулачковых пряжек либо к задней пластине, либо к пластиковому элементу сбоку (рис. 2-3). Направьте ремни влево и вправо рядом с обивкой спинки к соответствующей кулачковой пряжке и зафиксируйте их.

СОВЕТ: Длину ремня также можно регулировать спереди. Потяните за D-образное кольцо, чтобы укоротить ремень.