

# EASyS

## Подголовник с боковыми поддержками


Инструкция по сборке - аксессуар



Thomashilfen



1

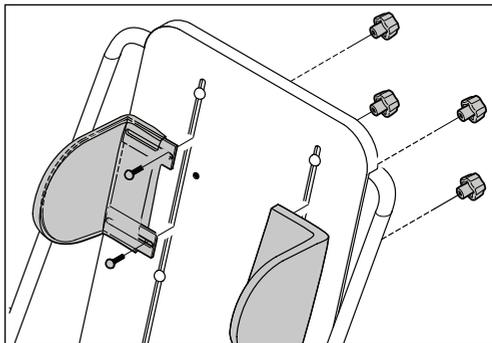

2



3

Откройте клапан обивки спинки, освободив застежку на крючок и петлю. Сложите обивку вверх.

Обивка подголовников должна оставаться на опорах при установке их на спинку. Свободный конец подкладки на внутренней стороне опор для головок можно приподнять для облегчения монтажа. (рис. 1)

Пожалуйста, установите подголовник поверх пазов в пластине спинки. Внешняя часть подкладки на спине должна находиться под подголовником.

Вставьте один винт в верхний паз опоры для головы и вертикальный паз в спинке. Закрепите винт одной из звездчатых гаек. Повторите эту процедуру с нижним пазом в опоре для головки. Важно лишь слегка затянуть первый винт. Это облегчает затяжку второго винта. (рис. 2)

Установите опоры головки в нужное положение, а затем затяните оба винта. Застегните подкладку спинки с помощью застежки на крючок и петлю. Поместите свободный конец подкладки для поддержки головы под среднюю часть подкладки для спины. (рис. 3)